

Handhabung der Sauerstoffflasche:

A) Einstellen

1. Patienten orientieren.
2. Durchflussregler steht auf 0 Liter.
3. Sauerstoff - Flaschenventil langsam aufdrehen.
4. Kontrolle über Inhaltmenge am Manometer.
5. Nasenbrille bzw. Sauerstoff-Maske am Patienten anbringen und fixieren.
6. Verbindungsschlauch mit Nasenbrille / bzw. Sauerstoff-Maske verbinden.
7. Am Durchflussregler die Liter pro Minute einstellen (je nach Bedarf Patient).
8. Notieren:
Zeit, Liter pro Minute, Veränderungen, etc.
9. Fühlt der Patient sich besser?
(Veränderungen notieren!)
10. Sitz und Fixation der Nasenbrille bzw. Sauerstoff-Maske kontrollieren.

Gefahren mit der O₂ - Flasche

1. Flasche niemals fallen lassen.
2. Brandgefahr: Zigaretten, Glut, Flammen
3. Kein Fett an Kupplungsteile. (Brandgefahr)

B) Abstellen

1. Durchflussregler auf 0 Liter stellen.
2. Verbindungsschlauch vom Nasenbrille bzw. Sauerstoff-Maske trennen.
3. Flaschendruck auf dem Manometer ablesen und eintragen (für Materialverwalter/in).
4. Flaschenventil schliessen.
5. Durchflussregler ganz öffnen bis das Flaschenmanometer 0 bar anzeigt.
6. Durchflussregler auf 0 Liter stellen.

Juli 2016 baa (Version1)

Weitere Informationen zur Aus- und Weiterbildung finden sich unter:

- **Beratung und Schulung in der Notfallmedizin**,
André Baron, andre.baron@hotmail.ch, 078 605 23 04
- **Apo-Kurse**
Esther Indra, esther.indra@apo-kurse.ch, www.apo-kurse.ch,
079 697 78 26